

FLEX 02


Potilaan ohjaama happirikastimen happivirtauksen rajoitin.

Johdanto

Lääkärisi on todennut, että lisähapesta olisi sinulle hyötyä, ja hän on määrännyt sinulle kaksi happitasoa – yhden annoksen rasiuksen ajaksi ja toisen levon ajaksi. Jotta sinun ei tarvitse siirtyä happirikastimen luo säätämään annosta, FlexO2 voidaan kiinnittää ulottuillesi, ripustamalla se esimerkiksi kaulan ympärille, jolloin voit itse valita annoksen turvallisella tavalla. Näin voit esimerkiksi istuessasi tai maatessasi vaihtaa lepotilasta aktiivisuustilaan (katso kuva 2) ilman tarpeetonta liikkumista ja ponnistelua.

Kun vaihdat lepotilasta aktiivisuustilaan, käännä kahvaa niin, että se osoittaa suurempaan symboliin. Laite antaa lyhyen "puhalluksen", joka tuntuu ja kuuluu. Puhallus kuuluu asiaan ja osoittaa, että olet valinnut aktiviteettivirtauksen.


Kun vaihdat FlexO2:n takaisin aktiivisuutilasta lepotilaan, käännä kahvaa niin, että se osoittaa pienempään symboliin (katso kuva 4). Saat nyt lepoon mukautetun happiannoksen.

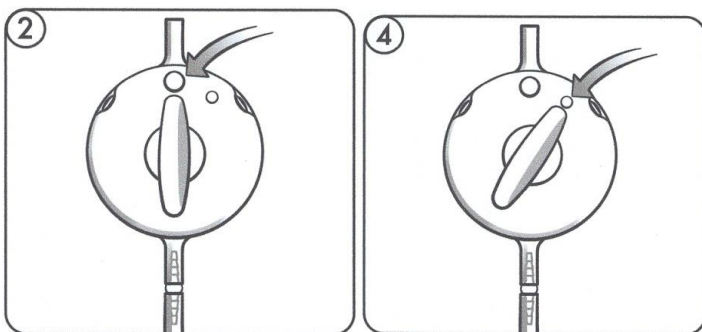

S-koukku

Voit käyttää S-koukkuja (ei sisälly toimitukseen), jonka toinen puoli kiinnitetään potilaan housuissa olevaan reikään, vyöhön tai napinreikään FlexO2:n alle siten, että se on pystysuunnassa mahdollisimman lähellä keskikohtaa.

Katso kuvat 10A ja 10B.

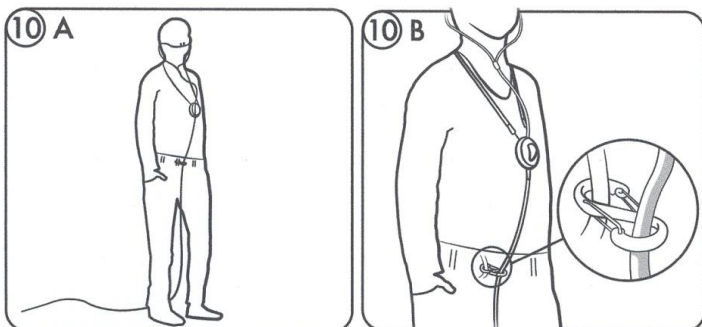


Kun tulet kotiin letku kiinnitettynä, letku voi jäädä helposti kiinni johonkin. Varmista tämän välttämiseksi, että happirikastimesta FlexO2:een tuleva letku pääsee roikkumaan pystysuunnassa S-koukun ohjaamana ja että se roikkuu alaspäin jalkojesi välistä ja ohjautuu taaksepäin. *Katso kuva 10A*. Kun vaihdat suuntaa, jalkasi ohjaavat letkua takanasi niin, että se seuraa kehoasi. Näin letku ei jää niin helposti kiinni ja kaatumisriski pienenee. Myös letkun vääntymisen tai kiertymisen riski on minimaalinen. Letku on löysästi kiinni sille kuuluvassa S-koukun osassa, eikä se voi jäädä jumiin. Tämä helpottaa esimerkiksi WC:ssä käyntiä.

Suihkussa käynti

FlexO2 on suojattava kosteudelta. Kun menet suihkuun, vaihda lyhyellä letkulla varustettu nenäkanyyli pidemmällä letkulla varustettuun nenäkanyyliin. Näin voit ripustaa laitteen suihkun sivulle ja suojata sen kosteudelta, mutta se on silti helposti saatavilla, jos annosta on vaihdettava.

Varotoimet

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, varmista, että laite on asetettu sinulle ja määrätyle happiannoksellesi. Kun lepää, varmista, että lepotila on valittuna, jotta happea ei tule liikaa. Tarkista säännöllisesti, että määrätty happitaso on oikea. Tämän voit tehdä lukemalla happirikastimen virtausmittarin pallo-osoittimen levon ja aktiivisuuden aikana. *Katso kuva 3*.

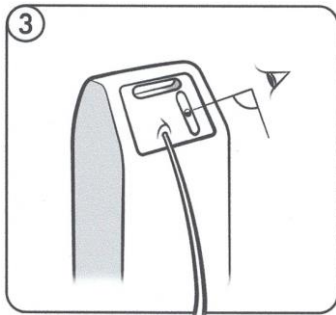

Tarkista säännöllisesti liitosletkut ja niiden toiminta ja varmista, että liitännät ovat kiinni tukevasti (eivät löysällä).

Liitä FlexO2:een pidempi nenäkanyyli, kun menet nukkumaan. Laite voidaan ripustaa sängyn vieressä olevaan koukkuun, jolloin se on helposti saatavilla.

Puhdistus

Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla. Laite kestää tavanomaisia desinfiointiaineita.


Huolto

Ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Kaulahihna

Laitteen mukana toimitetaan kaulahihna, joka kiinnitetään FlexO2:n kahteen ylempään kiinnityspisteeseen. Aloita kaulahihnan kiinnittäminen FlexO2:een erottamalla hihnan päissä olevat liitososat kahdeksi osaksi. Ota irrallinen osa ja pujota silmukka FlexO2:n reiän läpi. Työnnä sitten liitin silmukan läpi ja kiristä niin, että liittimet liittyvät toisiinsa. Toista sama toisen liittimen kanssa. *Katso kuva 8.* Hihnan avulla kuormitusta voidaan siirtää korvista kaulaan, ja kuormitus voidaan jakaa laajemmalle alueelle.

Hihna on säädettävissä, ja siihen on lisätty turvamekanismi, joka erottaa hihnan, jos käyttäjä jää kiinni johonkin.

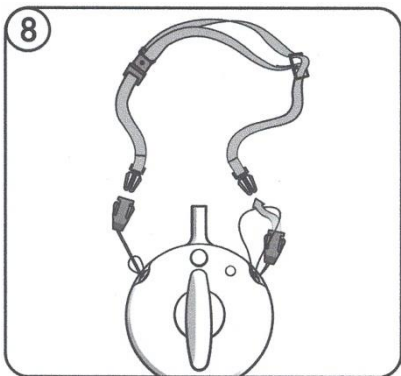

Käyttöaika

Kun laitetta on käytetty kaksi (2) kuukautta, se on vaihdettava. Viimeinen käyttöpäivämäärä näkyy laitteen takaosassa. **TÄRKEÄÄ** Valmistaja antaa laitteelle enintään kahden (2) kuukauden takuun ensimmäisestä käyttökerrasta lukien. Tämän jälkeen laitetta ei saa käyttää, eikä tuotetta ole enää hyväksytty käytettäväksi.

Jos laite on vaurioitunut tai sen epäillään vaurioituneen, se on vaihdettava.

Hävittäminen

Hävittävä palavana jätteenä.



LungFlex AB
Garvaren
SE-341 60 Ljungby
info@lungflex.com
www.flexo2.com



0402



Kertakäyttöinen



Versio 2022-09-04

